

CareLink Connect Heroku EU szerverek tiltása hiba átmeneti „megoldása” PC adatfeltöltő programmal

Átmeneti javítás a 2020.12.06 Medtronic szerverfrissítés óta letiltott Heroku szerverekről nem működő CareLink Connect adatátvitelre egy számítógépről önállóan futtatható adatfeltöltő programmal. Ez csak egy átmeneti megoldása a problémának, használatához szükséges egy számítógépet folyamatosan bekapcsolva tartani vagy legalábbis akkor, amikor a feltöltő használatban van.

(Az adatfeltöltő program a Nightscout fejlesztők által készített GitHub-on elérhető Node.js adatfeltöltő programkódot használja, de használatához nem szükséges külön Node.js környezet telepítése.)




Telepítés lépései


- 1) Számítógép (laptop, asztali gép) operációs rendszeréhez megfelelő adatfeltöltő program letöltése (Windows x86 vagy Windows x64 vagy MacOS x64 vagy Linux X64)
- 2) Letöltött fájl kitömörítése
- 3) .env paraméter fájlban CareLink és Nightscout paraméterek kitöltése, majd fájl mentése
- 4) Adatfeltöltő program futtatása

1. Feltöltő program használata Windows operációs rendszer esetén


1.1. Böngészőben a <http://nskezikonyv.atwebpages.com/letoltheto-anyagok/> oldal megnyitása

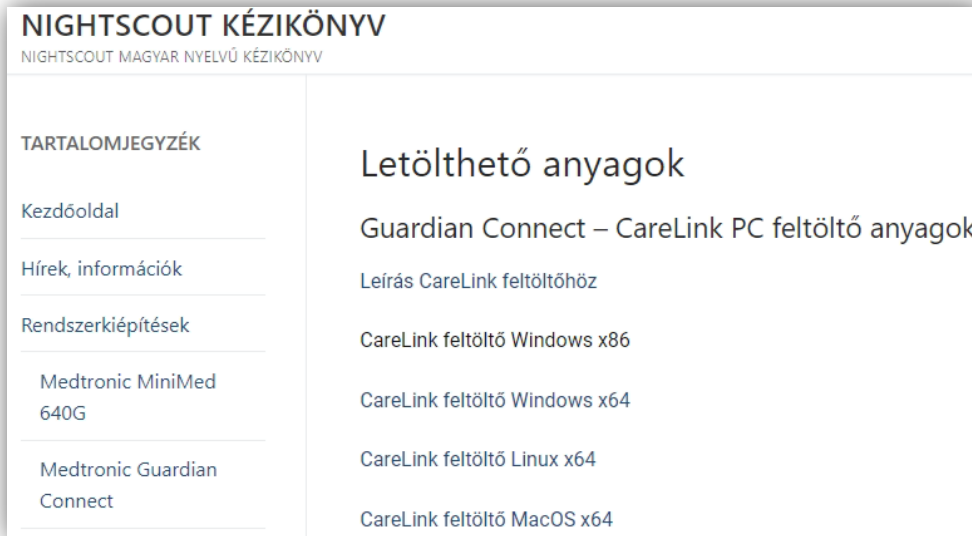


1.2. CareLinkPcUploader-win-x86.zip letöltése a „CareLink feltöltő Windows x86” linkre kattintva

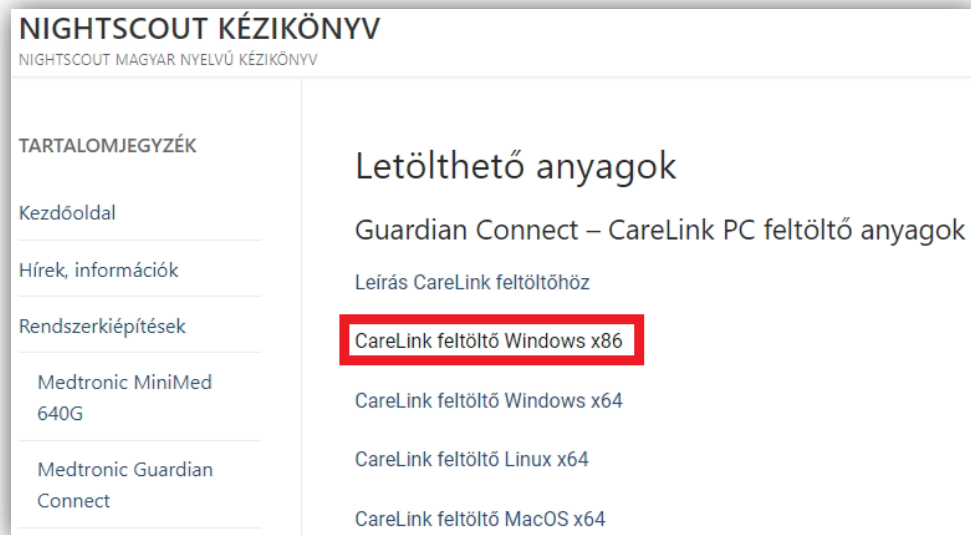


1.3. Letöltött tömörített fájlt tartalmazó mappa megnyitása (jellemzően Letöltések mappába kerül)

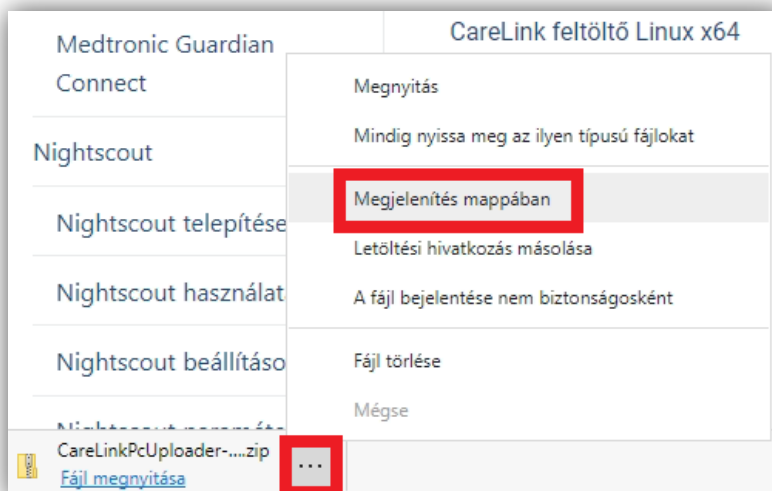


1.4. Jobb kattintás a CareLinkPcUploader-win-x86.zip fájlra és kattintás „Az összes kibontása...” funkcióra

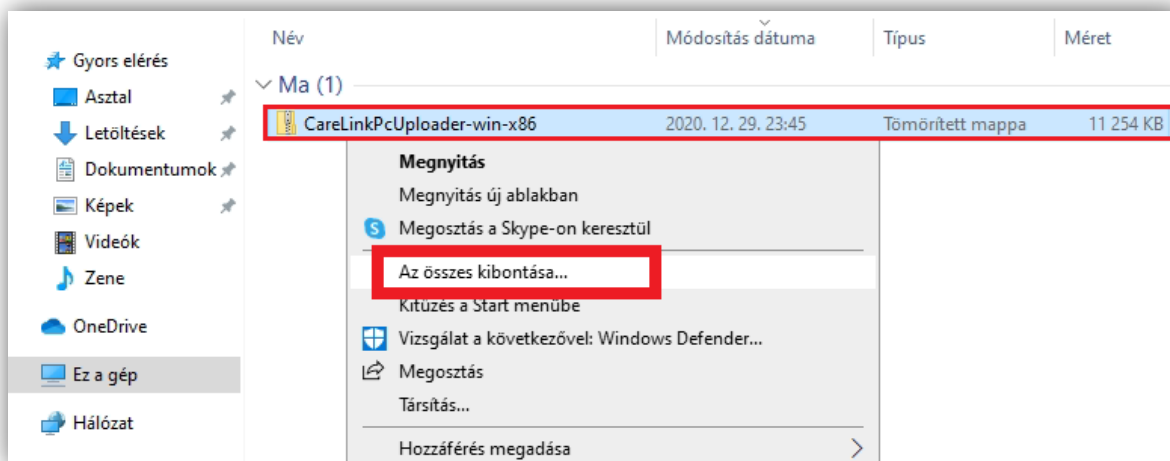




1.5. Kibontás

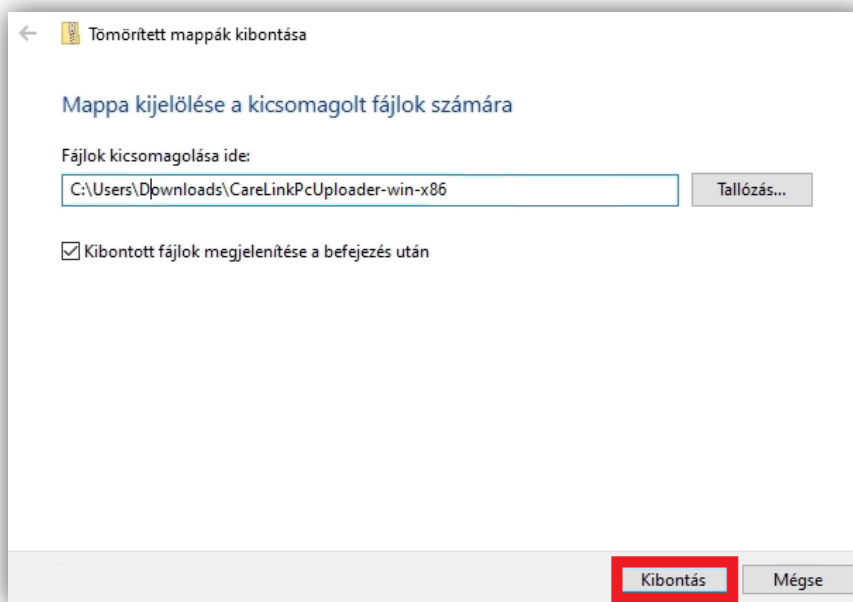

1.6. Mappa megnyitása

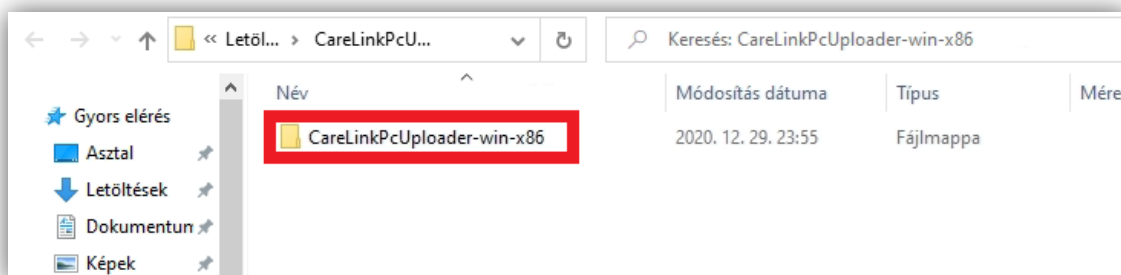

1.7. .env paraméterfájl megnyitása egy tetszőleges szövegszerkesztővel Például jegyzetömbbel:

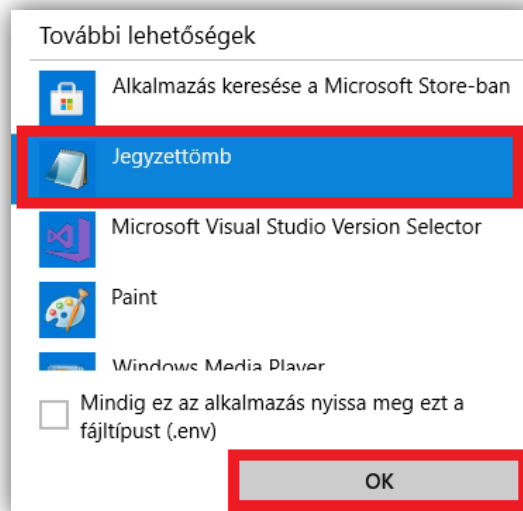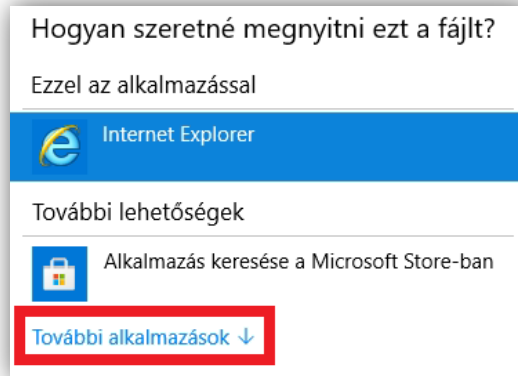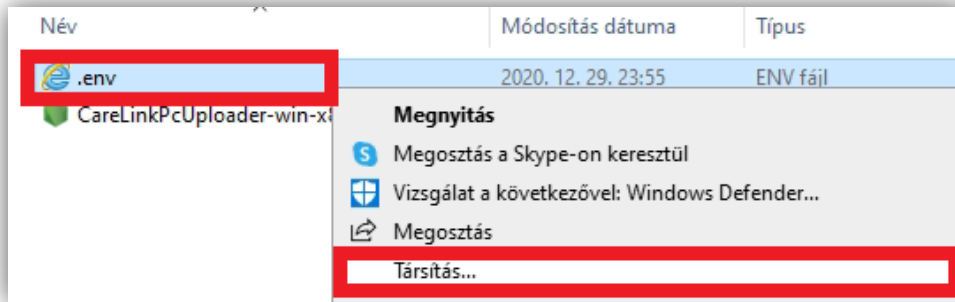

```
.env - Jegyzetömb
Fájl Szerkesztés Formátum Nézet Súgó
|*****#
#
# CareLink PC Uploader konfigurációs fájl
# -----#
# - a programot az ebben a fájlban található paraméterek vezérik
# - a paraméterek értéket a '=' jel után kell beírni
#
#*****#

# 1) Medtronic CareLink regio (EU vagy US), Magyarország esetén EU
MMCONNECT_SERVER=EU

# 2) CareLink felhasználóneve, CareLink-be való bejelentkezés megadott felhasználóneve
CARELINK_USERNAME=

# 3) CareLink jelszó, CareLink-be való bejelentkezés megadott jelszó
CARELINK_PASSWORD=
```

1.8. Paraméterek kitöltése fájlban az '=' jelek után

```
# 1) Medtronic CareLink regio (EU vagy US), Magyarország eseten EU
MMCONNECT_SERVER=EU

# 2) CareLink felhasználonev, CareLink-be valo belepeskor megadott felhasználonev
CARELINK_USERNAME=felhasznalonev ← CareLink felhasználónév


# 3) CareLink jelszo, CareLink-be valo belepeskor megadott jelszo
CARELINK_PASSWORD=jelszo ← CareLink jelszó

# 4) Naplo elrejtése (true vagy false), ne jelenitse meg folyamatosan a kommunikacios naplot
CARELINK_QUIET=true


# 5) Nightscout API SECRET jelszo, Nightscout-ban hasznalt API SECRET jelszo
API_SECRET=jelszo1234567 ← Nightscout API SECRET jelszó

# 6) Nightscout URL (valami.herokuapp.com), Nightscout webalkalmazas URL "https://" nelkul,
WEBSITE_HOSTNAME=nightscoutdemo.herokuapp.com ← Nightscout oldal „https://” nélkül
```


1.9. Paraméterek kitöltése után .env fájl mentése

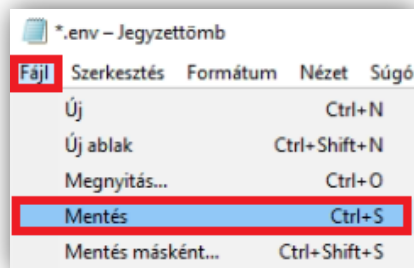

1.10. Adatfeltöltése indítása a CareLinkPcUploader-win-x86.exe programra kattintással

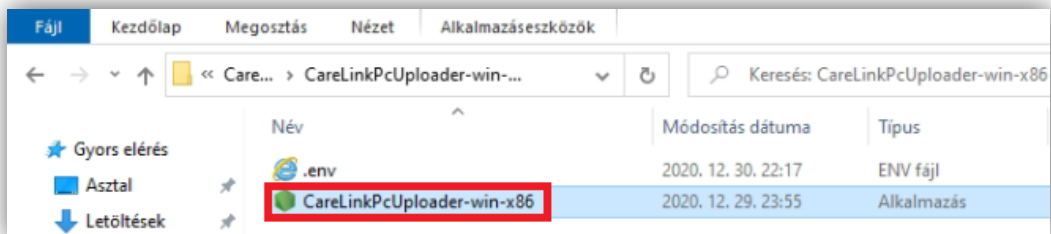


1.11. Program futtatásának engedélyezése Windows 10 operációs rendszer esetén

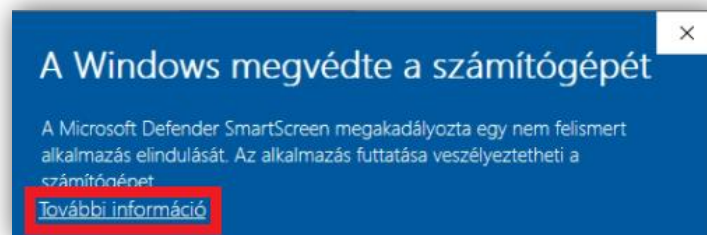



1.12. CareLink adatfeltöltő program fut

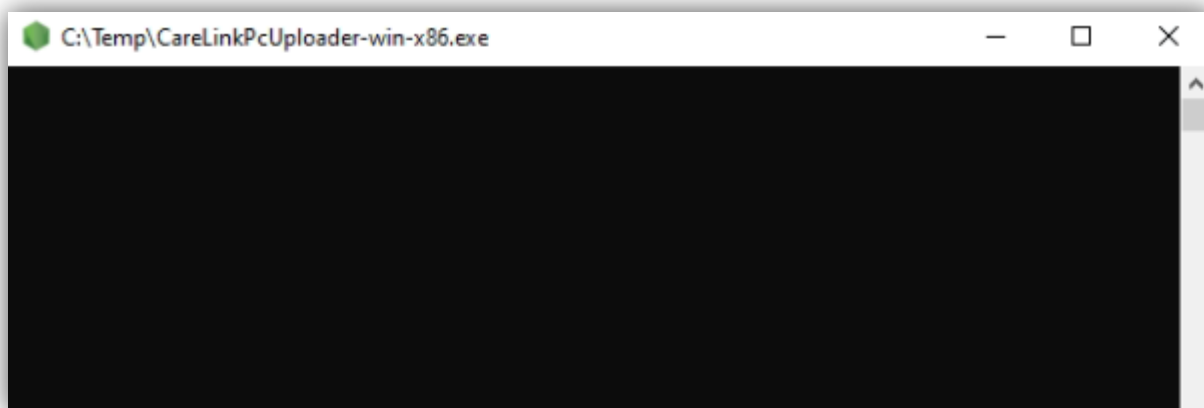

1.13. Adatfelöltést leállítani a program futtatási ablak bezárásával lehet

